
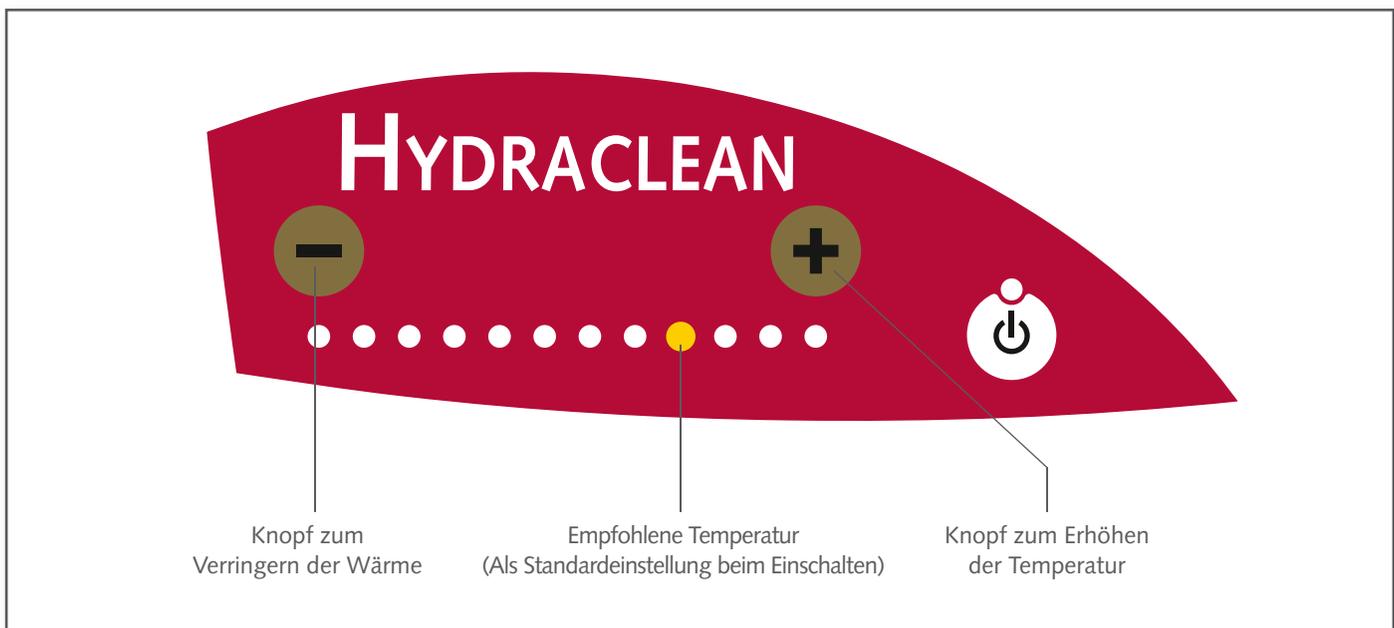


DAS **HYDRACLEAN** GERÄT

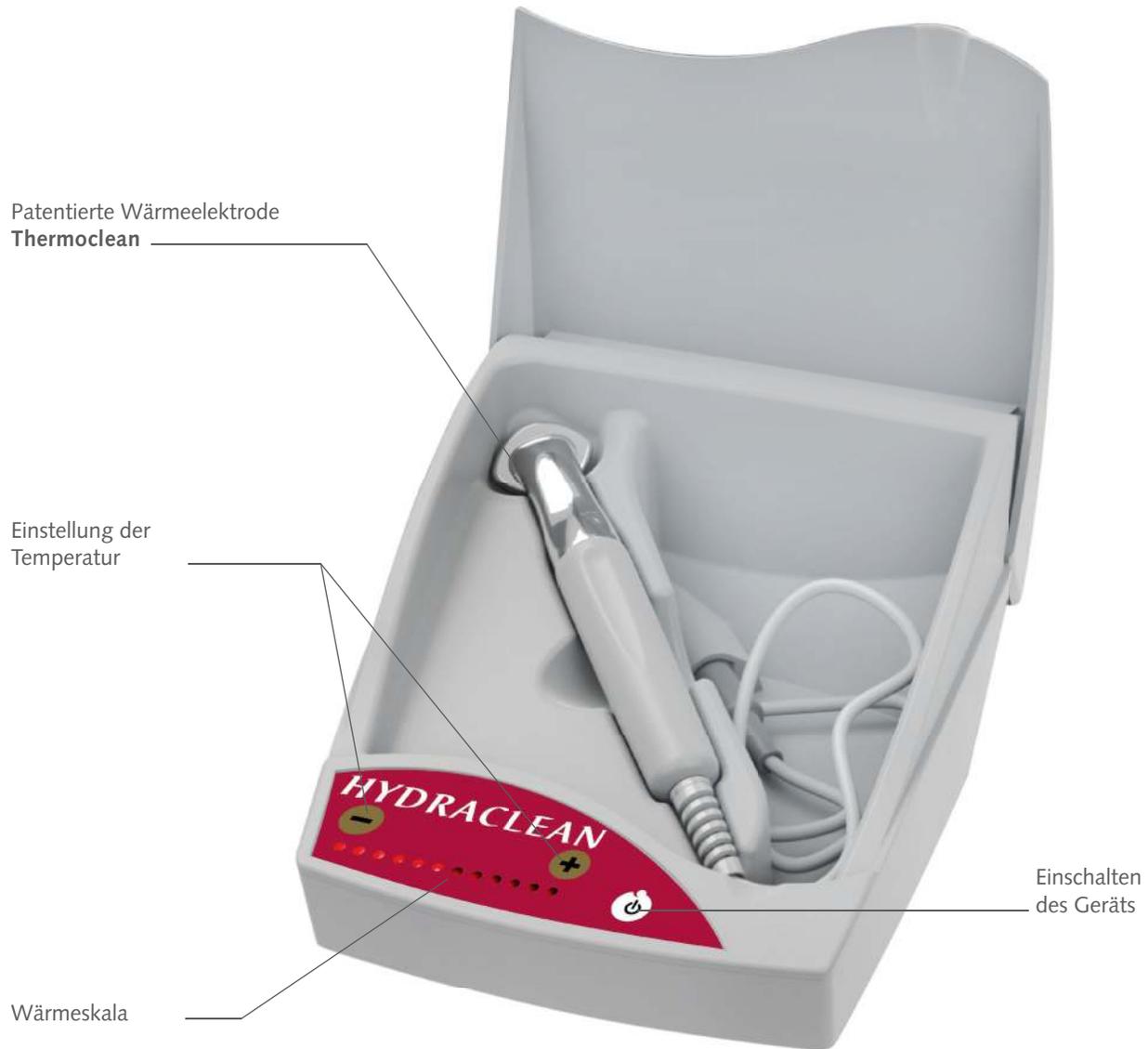

GUINOT
INSTITUT • PARIS

HYDRACLEAN

Tiefreinigende
Behandlung



PRAKTISCHER RATGEBER

PROTOKOLL DER BEHANDLUNG

HYDRACLEAN

30 Minuten in der Kabine

 <p>SPRECHSTUNDE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Führen Sie vor der Behandlung ein beratendes Gespräch mit der Kundin, um das ihrem Hauttyp entsprechende Gel Nettoyant zu ermitteln.
 <p>VORBEREITUNG DER HAUT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gesichts- und Augen-Make-up mit EAU DÉMAQUILLANTE MICELLAIRE entfernen. - Mit einem Tuch trocknen. - Tragen Sie bei Bedarf das geeignete Peeling auf das gesamte Gesicht und den Hals auf, die Augenkontur dabei aussparen. - Abwaschen, Lotion auftragen und mit einem Tuch trocknen.
<p>1</p> <p>TIEFENREINIGUNG</p>  <p>Mit der Wärmeelektrode Thermoclean</p>	<p style="text-align: right;">10'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Elektrode vorheizen, bis die Kontrollleuchte aufhört zu blinken. - 10ml des ausgewählten Reinigungsgels auftragen <ul style="list-style-type: none"> - GEL NETTOYANT UNIVERSEL – Alle Hauttypen - GEL NETTOYANT PURETÉ – Fettige Haut - Die Elektrode gemäß dem Protokoll 10 Minuten lang über das Gesicht bewegen. Jede Bewegung 3-mal wiederholen und in der T-Zone langsamer ausführen. - Überschüssiges Gel mit einem Spatel abnehmen. - Abwaschen. - Eventuell vorhandene Mitesser entfernen. - Die Lotion auftragen und mit einem Tuch trocknen.
<p>2</p>  <p>SCHÖNHEITSMASSAGE</p>	<p style="text-align: right;">5 bis 7'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führen Sie Ihre eigene Massage mit dem MODELAGE BEAUTÉ SÉRUM CRÈME auf dem Gesicht durch 5 bis 7 Minuten. - Die Lotion auftragen und mit einem Tuch trocknen.
<p>SCHÖNHEITSOPTIMIERUNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die geeignete Pflegecreme auftragen. - Das Schönheitsresultat von der Kundin bestätigen lassen.
<p>HÄUFIGKEIT</p>	<p>Alle Hauttypen: 1 Behandlung pro Monat. Fettige Haut: 1 bis 2 Behandlungen pro Monat.</p>

TIEFENREINIGUNG

ANWENDUNG DER ELEKTRODE

Die Elektrode 10 Minuten vor Behandlungsbeginn vorheizen.



Die Elektrode ist warm, sobald die Kontrollleuchte aufhört zu blinken.

Die Temperatur auf der Hand überprüfen und der Empfindlichkeit der Kundin anpassen.

10ml des dem Hauttyp der Kundin entsprechenden Gel Nettoyant auftragen.

Das Gel in dicker Schicht auf die Elektrode auftragen, bevor Sie mit Bewegung 1 beginnen.

Jede Bewegung ist 3-mal hin und zurück durchzuführen, die Bewegung in der T-Zone verlangsamen. Insgesamt dauern die Bewegungen **10 Minuten**.

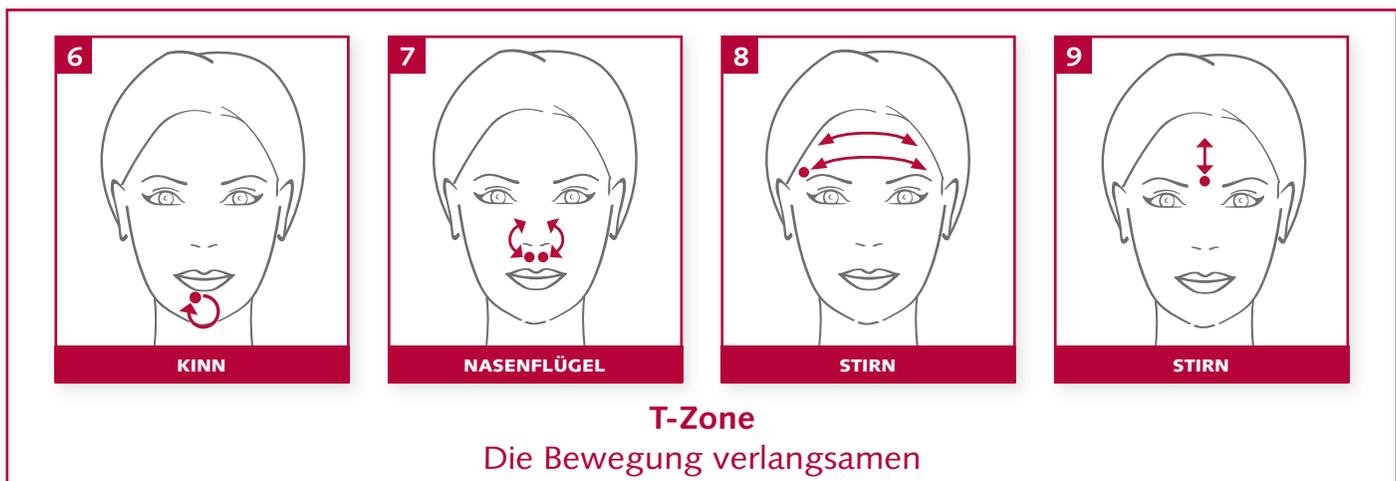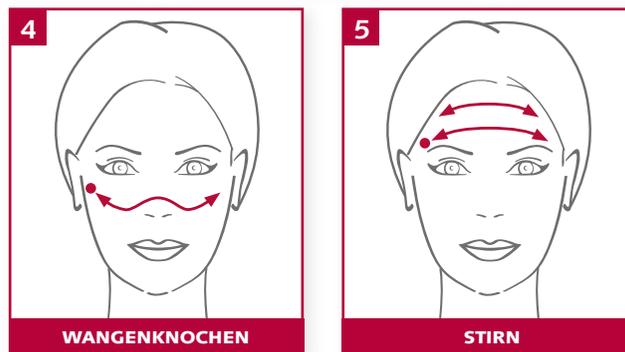

LEGENDE DER ELEKTRODEN-BEWEGUNGEN

● Ausgangspunkt der Elektrode